
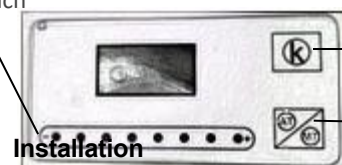


Anwendungsbereich


Die in der Zahnarztpraxis verwendeten Operationsleuchten, die zur Ausleuchtung der Mundhöhle der Patienten bestimmt sind.

Aufbau der Leuchte

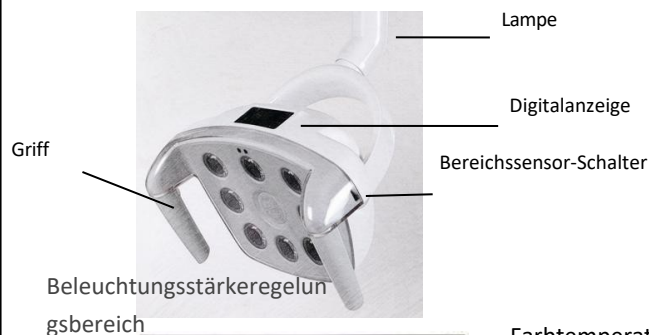

Farbtemperatur einstellen

AT: Automatikbetrieb MT:
Manueller Betrieb

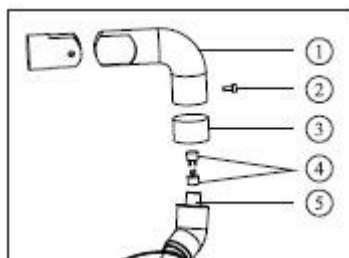

①Lampenarm ②Schraube ③Zierblende

④Stecker ⑤Verbindungsstange

Montageanleitung:

Verbinden Sie den Lampenarm, die Zierblende und den Stecker gemäß der Abbildung in der Anleitung.

Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle 12 V–24 V Wechselstrom liefert.

Betriebszustand

Betriebszustand		Transport- und Lagerbedingungen	
Temperatur	5–40 °C	Temperatur	-40–70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30–75 %	Relative Luftfeuchtigkeit	-10–+100 %
Atmosphärendruck	70–106 kPa	Atmosphärendruck	50–106 kPa

Technische Daten

Eingangsspannung	12 V–24 V Wechselstrom
Leistung	3–15 W (Nennleistung 24 W)
Beleuchtungsstärke	7.000–60.000 Lux
Farbtemperatur	4.000 K – 5.500 K
Nettogewicht	1.850 g
Bruttogewicht	2560 g

Bedienungsanleitung



1. Wenn Sie „AT“ oder „MT“ berühren, können Sie den Betriebsmodus zwischen Automatik- und Handbetrieb umschalten.

2. Befindet sich die Leuchte im AT-Modus, lässt sie sich über den Sensorschalter bedienen. Wenn Sie den Sensorschalter aus einer Entfernung von bis zu 10 cm streifen, wird die Leuchte ein- oder ausgeschaltet. Bei eingeschalteter Leuchte können Sie die Helligkeit regulieren, indem Sie Ihre Hand aus einer Entfernung von bis zu 10 cm vor den Sensor halten. Durch Berühren der Taste „K“ können Sie zwischen niedrigen und hohen Farbtemperaturen Farbtemperatur.

3. Wenn die Leuchte im AT- oder MT-Modus eingeschaltet ist, können Sie die Taste K drücken, um die Farbtemperatur zu ändern.
4. Unabhängig davon, ob sich die Leuchte im AT- oder MT-Modus befindet: Wenn die Leuchte eingeschaltet ist, können Sie die Helligkeit anpassen, indem Sie den Schieberegler im Helligkeitsanpassungsbereich des digitalen Anzeigebereich.
5. Die Leuchte verfügt über eine Speicherfunktion, die die zuletzt eingestellte Beleuchtungsstärke speichert. 5. Die Leuchte verfügt über eine Speicherfunktion, die die zuletzt eingestellte Beleuchtungsstärke speichert.
6. Dreiaxsig: Stellen Sie den Winkel des Griffs so ein, dass das Licht genau in die Position gerichtet ist, an die Sie sich gewöhnt haben. Ermöglicht eine unbegrenzte Positionierung.
7. Die Griffabdeckungen der Leuchten können bei hohen Temperaturen desinfiziert werden.

Wartung und Hinweise

Reinigen Sie die Leuchte mit dem 3-Funktionen-Sprühgerät oder mit weicher Baumwolle und einem feuchten Tuch. Der Griff kann abgenommen und bei hohen Temperaturen desinfiziert werden.

Hinweis:

Verwenden Sie zum Reinigen oder Abwischen der Leuchte keine ätzenden Reinigungsmittel oder raue Tücher.

Bedienungsanleitung für die LED-Zahnarztleuchte



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen.