
Zahnaufhellungsgerät

MD885L
Bedienungsanleitung



Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung durch.

Sound Warning

- a) Nach dem Start gibt das Gerät jede Minute einen Signalton ab.
- b) Nach Beendigung des Vorgangs ertönen drei Signaltöne.

Cooling Setting

- a) . Um sicherzustellen, dass alle LEDs während des Aufhellungsvorgangs bei normaler Temperatur funktionieren, haben wir einen hocheffizienten und leisen Lüfter eingebaut, der die Wärme abführt. .
- b) . Dank des integrierten intelligenten Temperaturschutzes schaltet sich das Gerät bei zu hoher Temperatur automatisch ab; nach dem Abkühlen funktioniert alles wieder einwandfrei.

Liability

Montage, Ausrichten, Nachjustierung, Umbau und Reparatur dürfen nur von einer von unserem Unternehmen autorisierten Person durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie die einschlägigen Anforderungen für die Installation elektrischer Geräte. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts. .

8. Anleitung zur Einstellung der Bildschirmhelligkeit



Catalogue

1. Sicherheit	
2 Anwendung	2
3. Skizzen zur Installation	3
4. Produktaufbau	7
5. Product Feature	
6. Produktspezifikation	9
7. Operation Instruction	10
8. Haftung	17

7. Anleitung zur Moduseinstellung

Safety


Hinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, die in der Anleitung empfohlen werden.


-  Achtung: Es ist wichtig, die folgenden Vorsichtsmaßnahmen und Vorgehensweisen zu beachten.
-  Achtung: Bitte setzen Sie dieses Gerät nicht bei Personen ein, die in der Vergangenheit unter Lichtempfindlichkeit gelitten haben oder photosensibilisierende Medikamente einnehmen.
-  Achtung: Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Gegenwart von brennbaren Anästhesiemitteln in Mischung mit Luft oder Lachgas geeignet.
-  Achtung: Bitte blicken Sie nicht direkt in das Licht und tragen Sie während des Betriebs unbedingt eine Schutzbrille, da es sonst zu Augenverletzungen kommen kann.
-  Achtung: Bitte lösen Sie die Sicherungsmutter und das Handrad, wenn Sie die Position des Geräts einstellen, und nehmen Sie die Einstellung anschließend erneut vor, da dies sonst die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt.

Application

Das MD885L ist ein gekühltes Lichtgerät, das eine bestimmte Wellenlänge ausstrahlt. Das Licht bestrahlt ein spezielles Aufhellungsmittel, das auf die Zahnoberfläche aufgetragen wird, wodurch die Zähne aufgehellt werden.

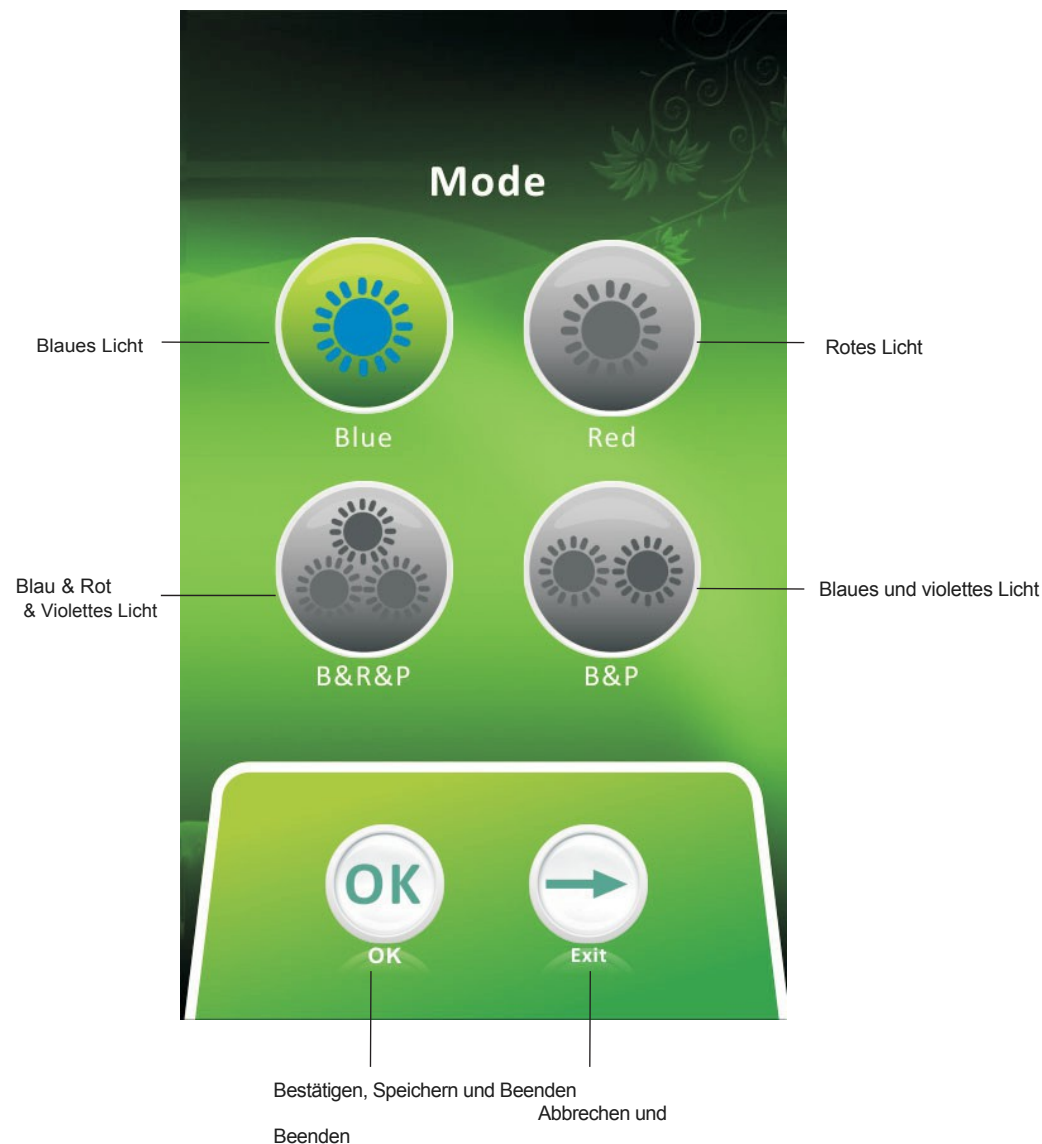

6. Anleitung zur Zeiteinstellung

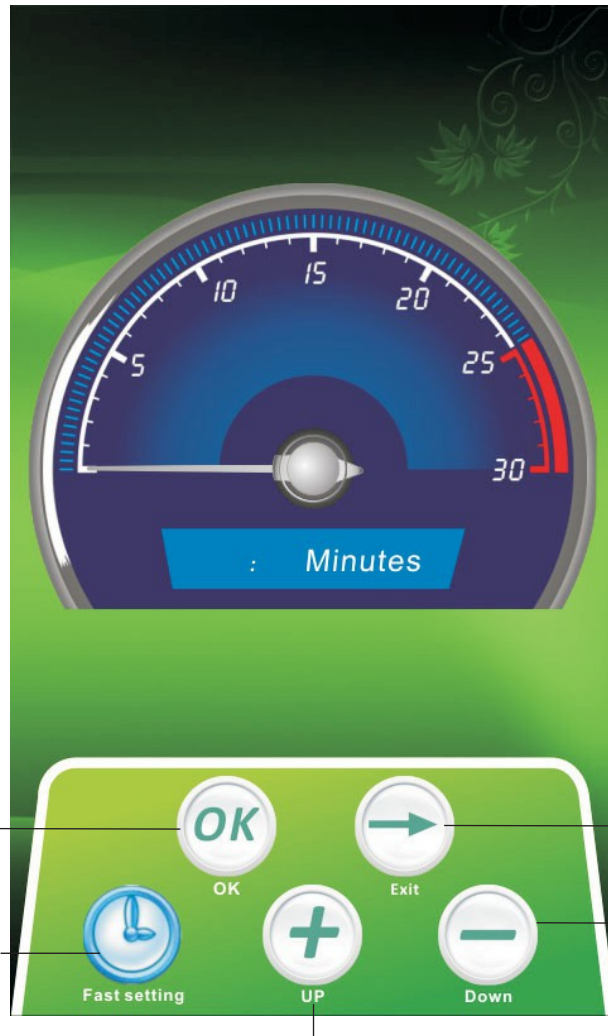

Bestätigen,
speichern und
beenden

Schnelleinstellung
(Einmal drücken
5mins hinzufügen)

Abbrechen
und
Beenden

Einmal drücken:
minus eine
Minute

Einmal drücken: plus
eine Minute

Installation Sketch Map



1. Drehen Sie die Räder in
Richtung der Füße und ziehen
Sie sie mit einem
Schraubenschlüssel fest an

(1)



2. Befestigen Sie die 5
Fuß am feststehenden
Sitz.


(2)

Installation Sketch Map



3. Stecken Sie die 5 Eisen in den Fußsockel

(3)

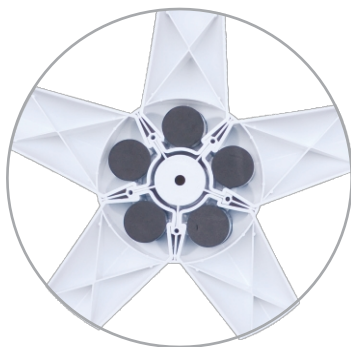

4. Hinweis: Für diesen Schritt wird ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt. Setzen Sie die Bodenplatte auf die Unterseite des Ständers, wobei alle Füße bereits montiert sind. Befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und ziehen Sie diese fest an.

(4)



5. Befestigen Sie die beiden Kabelhaken am Pfosten.



(5)

5. Anleitung zur Leistungseinstellung (Einstellen der Helligkeit der Lichtleistung)

Brightness

H 100%

Hohe Leistung

M 75%

Mittlere Leistung

L 50%

Niedrige Leistung

OK

OK

Bestätigen
Speichern
und Beenden

➔

Exit

Abbrechen und
Beenden

4. Funktionsanleitung für den Hauptbildschirm



Installation Sketch Map



6. Stellen Sie die Stange 1 mit dem aufgesetzten Zierset auf den feststehenden Sitz und stützen Sie sie mit der Hand ab.



7. Drehen Sie die Füße um und befestigen Sie den Sitz und die Stange mit einer langen Schraube. (Wenn die Schraube nicht fest angezogen ist, wackelt die Stange.)

Installation Sketch Map

- ⚠ 8. Bitte lösen Sie zunächst die Mutter, wenn Sie die Position oder den Winkel der Maschine einstellen möchten oder den Winkel der Maschine anpassen möchten. Andernfalls kann die Maschine beschädigt werden oder die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt werden.



(8)



(Korrekte Bedienung)



(Falsche Bedienung)



9. Setzen Sie die Ablage auf das Säulenrohr, richten Sie sie aus und ziehen Sie dann die Mutter fest.


(9)



10. Stecken Sie Stange 2 in Stange 1 und drehen Sie das befestigte Eisenrohr fest.

(10)

3. Anweisungen auf dem Einschaltbildschirm

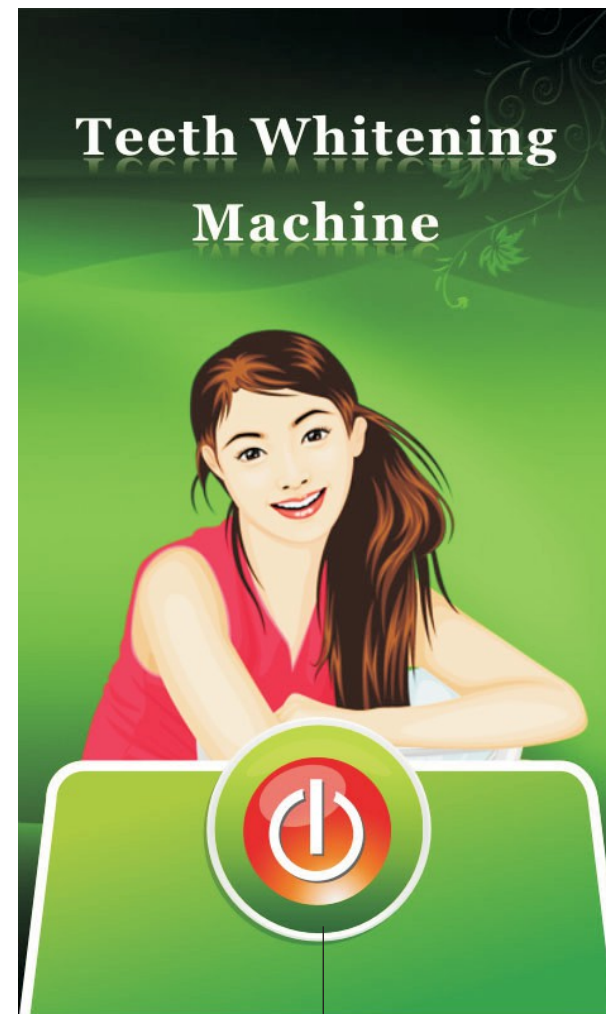

Ein-/Aus-Taste
(hier drücken, um den Hauptmenü-Bildschirm aufzurufen)

Operation Instruction


1. Schalten Sie das Zahnaufhellungsgerät ein

- Stecken Sie das Netzkabel ein.
- Schalten Sie den Netzschalter des Zahnaufhellungsgeräts ein.



Netzschalter


2. Einführung in den Kopf

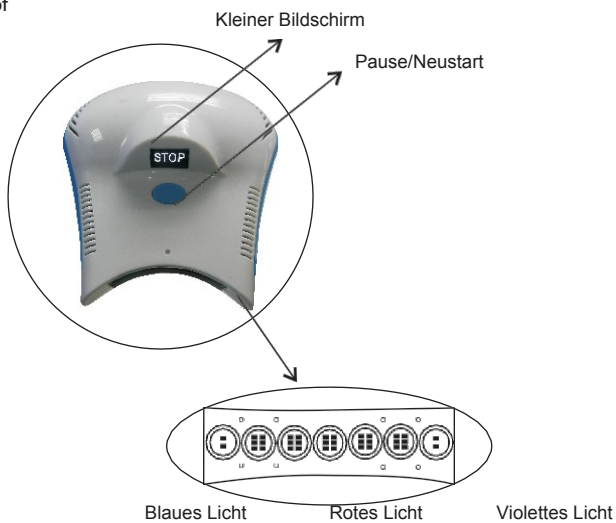


Enthält fünf leistungsstarke blaue LEDs, zwei rote LEDs und acht violette LEDs

Product Structure

⚠ Bitte lösen Sie die Mutter zunächst, wenn Sie die Position oder den Winkel der Maschine einstellen müssen, da dies sonst die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt.

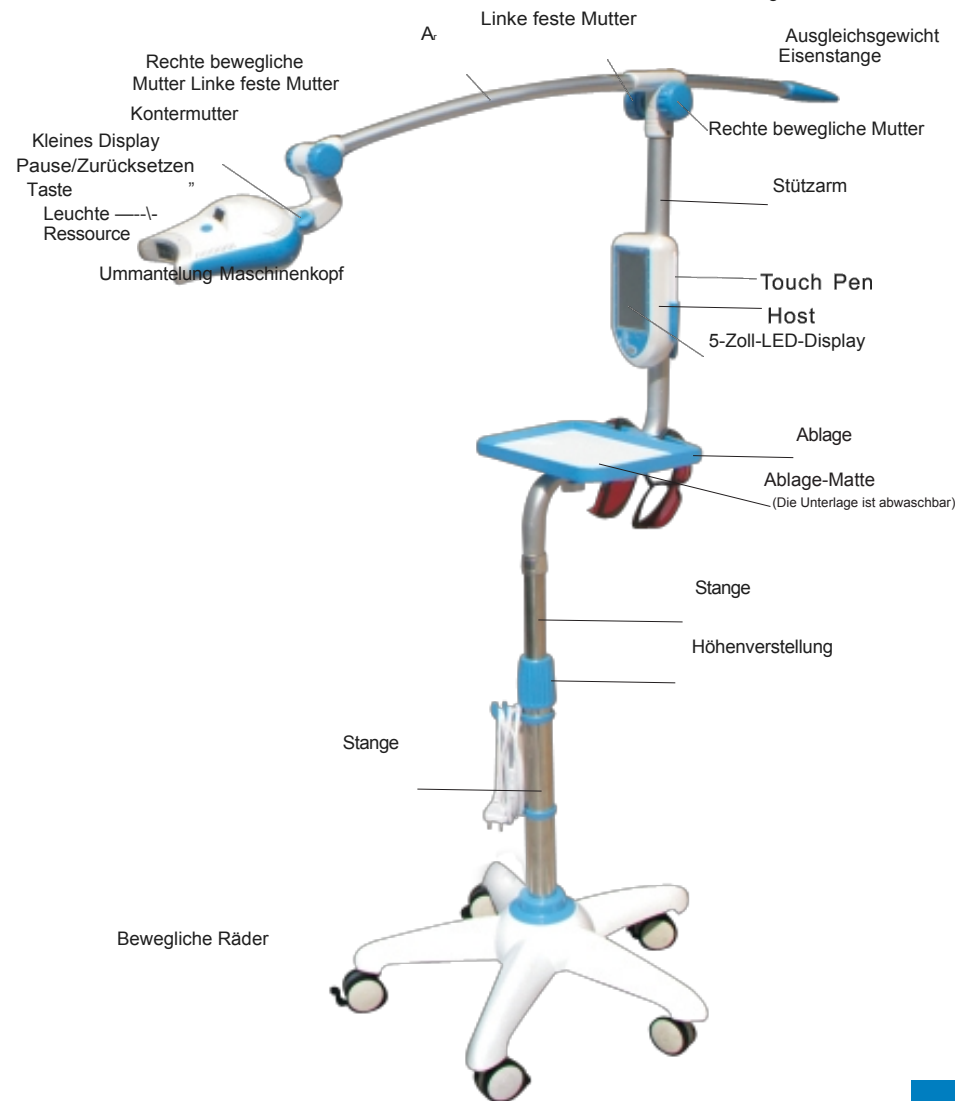

Host Back instruction

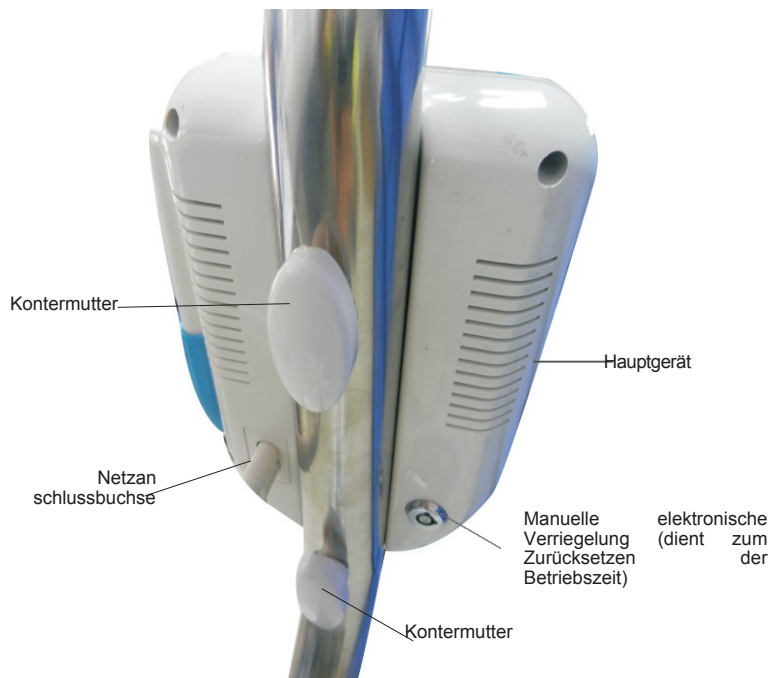

Accessories

MD885 L	1 Stück
Netzkabel	1 Stück (2 m)
Schutzbrille	2 Paar
Hülle	20 Stück
Mundspreizer	1 Stück
Bedienungsanleitung	1 Stück
Schale	1 Stück
Tablettunterlage	1 Stück

Product Feature

- * Hocheffiziente, an der Wand befestigte Schiebekonstruktion, frei einstellbarer Winkel und bequeme Bedienung.
- * Ein multifunktionales, hochempfindliches 5-Zoll-Touchscreen-Display, einfache Bedienung
- * Auswahl zwischen vier Lichtquellen: Blau, Rot, Blau + Rot + Violett, Blau + Violett
- * Dreistufige Leistungsauswahl: Der Anwender kann je nach Zustand des Patienten eine andere Leistung wählen
- * Der Benutzer kann die benötigte Zeit entsprechend der gewünschten Behandlung auswählen; der Einstellbereich liegt zwischen 1 und 30 Minuten
- * Funktion zur Erfassung der Betriebszeit, ausgestattet mit einer elektronischen Sperre; die Betriebszeit kann vom Benutzer über diese Sperre zurückgesetzt werden.
- * Bei Nichtgebrauch wechselt das Gerät nach 60 Sekunden automatisch in den Ruhemodus
- * Mitgelieferte Einweghülle verhindert Kreuzinfektionen, ist hygienisch und praktisch und sorgt dafür, dass sich der Patient wohlfühlt.

Product Specification

- * Breites Spektrum: 450 nm–510 nm (blaues Licht) & 620 nm–640 nm (rotes Licht) 380 nm–420 nm (violett Licht)
- * Spannung: Wechselstrom: 100 V–240 V
- * Lichtquelle: 4–5 W/Stück (blaues Licht); 2–3 W/Stück (rotes Licht); 1 W/Stück (violett Licht).
- * Bruttogewicht: Skgs.
- * Gesamtlänge des Arms: 90 cm.
- * Gesamthöhe: 120 cm.

Abstand zwischen Zähnen und Leuchte (mm)	Gleichmäßigkeit
10 mm	Über 95 %
20 mm	Über 90\
30 mm	Über 85y<
40 mm	Über 80\
50 mm	Über 75\

