


## Inhaltsverzeichnis

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. 【Zusammenfassung】                                     | 1  |
| 2. 【Anwendung】                                           | 1  |
| 3. 【Technische Daten】                                    | 2  |
| 4. 【Beschreibung des Produktaufbaus und der Komponenten】 | 3  |
| 5. 【Anleitung zur Handhabung des Geräts】                 | 4  |
| 6. 【Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen】                 | 5  |
| 7. 【Lagerung und Transport】                              | 7  |
| 8. 【Einfache Anleitung zur Fehlerbehebung】               | 8  |
| 9. 【Packliste】                                           |    |
| 10. 【Kundendienst】                                       | 9  |
| 11. 【Montagezeichnung】                                   | 10 |
| 12. 【Symbolic description】                               | 11 |



Lagerbedingungen: Druck: 50 kPa – 106 kPa

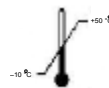


Lagerbedingungen: Temperatur: -10 °C bis +50 °C



Lagerbedingungen: Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 80 %



Kein Regen/keine Feuchtigkeit

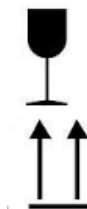

Vorsichtig behandeln

Nach oben

【Symbolische Beschreibung  
】



Achtung! Zugriff auf das Beipapier



Herstellungsdatum



Nur für den Innenbereich



Hersteller

**IPX0** Standardausstattung




Anbauteil vom Typ BF



Produktkonformität gemäß WEEE-Richtlinie

**IPX1**

Tropfschutzvorrichtung

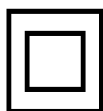

Geräte der Klasse II

## Zusammenfassung

1. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind überzeugt, dass Ihre Wahl Ihnen gute Erträge beschern und Ihr Geschäft fördern wird.
2. Das von unserem Unternehmen hergestellte Bleaching-System ist derzeit das fortschrittlichste seiner Art in China. Es wird durch den im Gerät integrierten Mikrocomputer gesteuert und kann das Zahnaufhellungsmittel katalysieren und eine präzise sowie effektive Reaktion auslösen, wodurch die Zähne tiefgreifend aufgehellt werden. Die Wellenlänge des emittierten blauen Lichts beträgt 460–490 nm, und es kann alle Oberflächen der Zähne effektiv bestrahlen, sodass jeder Zähne lassen sich aufhellen. Dies ist der entscheidende Durchbruch bei der Zahnaufhellung und der Bleaching-Technologie im zahnmedizinischen Bereich.
3. Die LED verfügt über eine automatische Temperaturregelung, sobald der Nutzer die Temperatur eingestellt hat.
4. Geeignet für eine Vielzahl von auf dem Markt erhältlichen Zahnaufhellungssets; wenn Sie das von unserem Unternehmen bereitgestellte Zahnaufhellungsgel wählen, ist der Aufhellungseffekt besser.
5. Die Vorgehensweise bei der Zahnaufhellung entnehmen Sie bitte der „Technischen Anleitung zur Zahnaufhellung“. Der Aufhellungseffekt nach der Behandlung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst und hängt hauptsächlich von der Qualität des Bleaching-Systems und des Aufhellungsmittels, dem fachlichen Niveau und der Erfahrung des behandelnden Zahnarztes sowie individuellen Unterschieden beim Patienten ab. Bitte beachten Sie dies!

## 【Aufbewahrung】

Das von unserem Unternehmen hergestellte Bleaching-System wird in der Zahnmedizin von Krankenhäusern, Zahnarztpraxen, Schönheitssalons, im Schulunterricht sowie von Einrichtungen oder Privatpersonen zur Zahnaufhellung usw. eingesetzt.

Äußere Ursachen für Zahnverfärbungen

- 1: Äußere Verfärbungen der Zähne (Raucherflecken, Kaffeelecken, Teelecken usw.)
- 2: Innere Zahnverfärbungen, Tetracyclin-Verfärbungen, Zahnfluorose.
- 3: Hereditäres Xanthodont.
- 4: Dunkle und gelbe Zähne aus unbekannten Gründen




Kontraindikationen: Es sind keine unerwünschten  
bei der klinischen Anwendung des Produkts

## 【Spezifikation】

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen des Rahmens       | Höhe: 480 mm, Armlänge: 900 mm, Breite: 1200 mm                    |
| Gewicht der Maschine          | 27 kg                                                              |
| Eingangsspannung              | AC100V~240V, 50/60Hz                                               |
| Ausgangsspannung              | 18 V Gleichstrom                                                   |
| Leistung                      | 60 VA                                                              |
| Wellenlänge des blauen Lichts | 400–460 nm                                                         |
| Intensität des blauen Lichts  | 300–400 mW/cm <sup>2</sup>                                         |
| Aufhellungsdauer              | 10-15 Minuten pro Sitzung, zwei bis drei Sitzungen pro Behandlung. |

## 【Beschreibung des Produktaufbaus und der Komponenten】

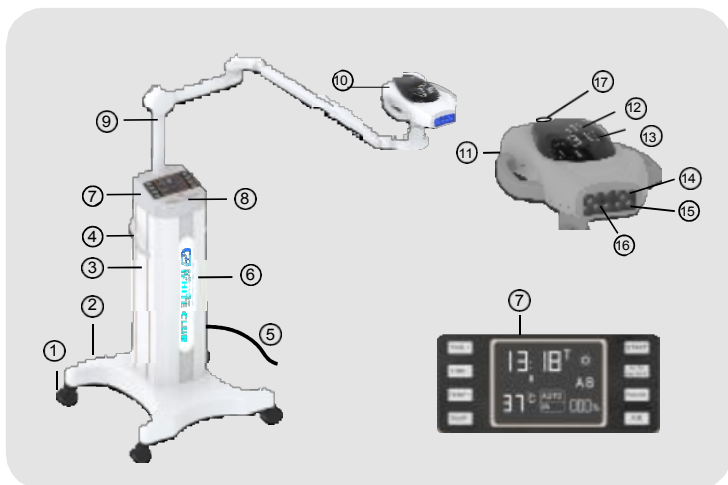

## 【Montagezeichnung】



1. Montieren Sie alle 4 Rollen am Rahmen



2. Den Körper in die Öffnung des Pferdes einführen.



3. Befestigen Sie den Körper und den Fußschmel mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsstreifen.



4. Montieren Sie die Verbindungsstange an Rumpf und ziehen Sie die Schrauben fest.



5. Stecken Sie den Stecker des Drehgelenks an Drearm am

oben an der Verbindungsstange.



7. Stecken Sie den Stecker des Hauptrahmens an 8. Montieren Sie den Hauptrahmen und der Drearm Pleuelstange. Die Oberseite des Drearms.



## 【Packliste】

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Hauptrahmen .....          | 1 Stück |
| 2. Dreharm .....              | 1 Stück |
| 3. Säule .....                | 2 Stück |
| 4. Pferd 5 .....              | 1 Stück |
| Laufrolle .....               | 5 Stück |
| 6. M10-Schraube .....         | 1 Stück |
| 7. Feste Scheibe .....        | 1 Stück |
| 8. Ø60 & Ø52 Zierbecher ..... | 1 Stück |
| 9. M4 Senkkopfschraube .....  | 2 Stück |
| 10. Drehbarer Stecker .....   | 1 Stück |
| 11. M4-Inbusschlüssel .....   | 1 Stück |
| 12. M5 Innensechskant- .....  | 2 Stück |
| 13. Bedienungsanleitung ..... | 1 Stück |
| 14. Zertifikat .....          | 1 Stück |
| 15. Garantiekarte .....       | 1 Stück |
| 16. Schutzrohr .....          | 2 Stück |
| 17. Blinker .....             | 2 Stück |

## 【Kundendienst】

Sehr geehrte Kunden, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung unserer Produkte sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen bei der Nutzung genau. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ordnungsgemäß verwenden. Sollten Sie Probleme oder Fragen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, eine lokale Vertretung oder einen Händler. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

## Anleitung zu den Komponenten:

- |                             |                      |                                |                 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. Trickle                  | 2. Abstützung        | 3. Gehäuse                     | 4. Griff        |
| 5. Stromkabel               | 6. LOGO              | 7. Bedienanzeige               | 8. Netzschalter |
| 9. Schwenkarm               | 10. Hauptrahmen      | 11. Schaltknopf am Hauptrahmen |                 |
| 12. Temperaturanzeige       | 13. Zeitanzeige      | 14. LED-Anzeigen (Gruppe A)    |                 |
| 15. LED-Anzeigen (Gruppe B) | 16. Temperatursensor | 17. Sensor-Pausetaste          |                 |

## 【Anleitung zur Handhabung des Geräts】

1. Das Bleichsystem sollte vor der Verwendung zusammengebaut werden. Bitte öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie die Teile aus der Verpackung, entfernen Sie die Schutzfolie und befolgen Sie dann den elften Abschnitt [Montageskizze] in dieser Anleitung, um das Gerät zusammenzubauen und zu überprüfen, ob alle Verbindungskabel korrekt angeschlossen sind

2. Stecken Sie den Stecker des Bleichsystems in die Steckdose und öffnen Sie dann

den Netzschalter des Netzteils (ON); gleichzeitig leuchtet der Bildschirm des Geräts schaltet sich ein und zeigt alle Parameter an, bevor das Gerät das letzte Mal ausgeschaltet wird. Siehe Abbildung 1:



Abbildung 1

3. Drücken Sie die Taste „TIME+“, die angezeigte Zeit blinkt, und Sie können die Zeit einstellen. Die Zeit wird jeweils um 1 Minute erhöht oder verringert. Der maximale Einstellbereich beträgt 30 Minuten. Drücken Sie abschließend erneut „TIME+“, um die Einstellung zu speichern.



Bild 2

4. Drücken Sie die Taste „TEMP+“, die angezeigte Temperatur blinkt, und Sie können die Temperatur einstellen. Die Temperatur erhöht oder verringert sich jeweils um 1 °C. Der maximale Einstellbereich für die Temperaturbereich liegt zwischen 30 und 40 °C. Drücken Sie abschließend erneut „TEMP+“, um die Einstellung zu speichern.



5. Wenn Sie die Taste „AUTO“ betätigen, blinkt die Leistungsanzeige; stellen Sie dann mit „TEMP+“ die Leistung ein – sie wird jeweils um 10 % erhöht oder verringert. Der Leistungsbereich reicht von 10 % bis 100 %.



Bild 4

6. Drücken Sie die Taste „START“; das Bleichsystem leuchtet auf und arbeitet ab diesem Zeitpunkt gemäß den eingestellten Anforderungen, während auf dem Display die verbleibende Betriebszeit und die Temperatur angezeigt werden. Wenn Sie den automatischen Konstanttemperaturbetrieb aktivieren, arbeitet das Gerät automatisch entsprechend der von Ihnen eingestellten Temperatur. Diese Funktion entspricht der des Hauptgeräts.



Abbildung 5

7. Drücken Sie die Taste „AUTO (ON/OFF)“; die Anzeige „AUTO“ blinkt und kann ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn „AUTO“ eingeschaltet ist, kann die Temperatur eingestellt werden; wenn es ausgeschaltet ist, kann die Leistung eingestellt werden.



Abbildung 6

8. Die „PAUSE“-Taste muss funktionieren, wenn die LED-Röhre leuchtet. „PAUSE“ ist die Pausentaste. Betätigen Sie diese Taste einmal, um den Aufhellungsvorgang zu unterbrechen; betätigen Sie sie erneut, um den Vorgang fortzusetzen.



Abbildung 7

## 【Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen】

1. Vermeiden Sie es, dass das blaue Licht direkt in die Augen von Personen strahlt, da dies zu schweren Augenverletzungen führen kann. Während der Betrieb des Bleaching-Systems läuft, müssen sowohl der Patient als auch der Arzt eine Schutzbrille tragen, um die Augen zu schützen.
2. Beim Verstellen des Geräts muss das Gerät mit einer Hand gestützt und mit der anderen Hand der Ständer festgehalten werden. Ziehen Sie dann langsam an der Halterung, um die Position des Geräts anzupassen. So verhindern Sie, dass das Bleaching-System umkippt, und stellen gleichzeitig sicher, dass sich das Stativ nicht verschiebt.
3. Das Bleaching-System sollte vor der Behandlung sterilisiert werden.
4. Nach dem Gebrauch sollte die Stromzufuhr rechtzeitig unterbrochen werden; der Kontakt mit harten Gegenständen oder Flüssigkeiten ist zu vermeiden.
5. Sollten bei der Nutzung des Bleaching-Systems Probleme auftreten, sind unbefugte Reparaturen untersagt, da sonst nicht gewährleistet werden kann, dass das Bleaching-System in einwandfreiem Zustand bleibt.

## 【Lagerung und Transport】

1. Um die Sicherheit der Produkte zu gewährleisten, ist während des Transports und beim Transportieren Vorsicht geboten: Es dürfen keine schweren Gegenstände gegen die Verpackung drücken, die Stapelhöhe darf fünf Lagen nicht überschreiten, und es ist für die Erhaltung der Ware ebenfalls sehr wichtig, dass keine Flüssigkeiten in die Verpackung gelangen.
2. Bei -10 °C bis 40 °C lagern, vor Korrosion schützen und an einem sauberen, gut belüfteten Ort mit einer relativer Luftfeuchtigkeit von 30 % 80 %.

## 【Einfache Anleitung zur Fehlerbehebung】

| Arten von Störungen | Die Ursachen des Fehlers                           | Lösungen                                |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Keine Anzeige       | Ausschalten                                        | Schalter ausschalten                    |
| Keine Ausgabe       | Ohne Einstellung der entsprechenden Parameter      | Stellen Sie die Parameter richtig ein   |
| Geringe Helligkeit  | Eine einzelne LED-Gruppe ausgewählt (nur A oder B) | Wählen Sie sowohl A als auch B aus      |
| Geringe Leuchtkraft | Ohne Einstellung der Ausgangsleistung auf 100 %    | 100 % Ausgangsleistung eingestellt      |
| Sonstige Störungen  |                                                    | Wenden Sie sich an unseren Kundendienst |