

Gebruiksaanweisung

Polymerisationslampe Woodpecker LED E

Schutzkappe

vor Einsatz entfernen

Lichtleiter (sterilisierbar)

Der Lichtleiter ist bis zum Anschlag, gerade in das Handstück einzuführen. Beim Entfernen darauf achten, dass der Lichtleiter gerade ohne Verkantung aus dem Handstück gezogen wird. Es droht sonst Bruchgefahr.

Ladekontakt

für Handstück

UV Schutz (abnehmbar)

Volle Leistung

Ansteigende Leistung

Pulsierende Leistung

Zeitwahl

5/10/15/20 Sekunden

Auswahl Modus

An / Aus

Standfuss

(Ladegehäuse)

Ladeanzeige

Bereitschaftsanzeige

Anschluss für das Netzteil

Vorderseite

Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Lampe.

Die Anzeige erhebt keinen Anspruch auf Genauigkeit. Angaben in mW/m²

Vorderseite

Rückseite

Akku auswechselbar

(Vor Inbetriebnahme Akku voll aufladen.)

Ladekontakt

Rückseite

Gebrauchsanweisung

Polymerisationslampe Woodpecker LED E

Wichtige Hinweise

Die LED-E Lampe ist ein Qualitätsprodukt und wird Ihnen bei sachgemäßer Behandlung lange und zufriedene Dienste leisten.

Aufbau des Gerätes:

- a) Stecken Sie den Lichtleiter bis zum Anschlag in das Handstück.
Vermeiden Sie unbedingt beim Einstecken und Herausziehen eine Verkantung.
Es könnte bei unsachgemäßer Behandlung zum Bruch des Lichtleiters oder zur Beschädigung des Handstückes führen.
- b) Stecken Sie den Blendschutz auf das Handstück
- c) Verbinden Sie die Ladeschale mittels beigefügtem Kabel mit Ihrem Stromnetz.
- d) Stellen Sie das Handstück in die Ladeschale und laden das Akku (3 Stunden Ladezeit vor dem 1. Einsatz) auf.
Das Akku hat keinen Memory Effekt, so dass das Handstück jederzeit in die Ladeschale gestellt werden kann, ohne dass das Akku Schaden nimmt.

Warnhinweise:

Beim Einsatz des Gerätes sind die Augen vor der Lichtquelle zu schützen.
Benutzen Sie die beiliegende Schutzblende und oder eine Schutzbrille.
Sehen Sie ohne UV-Augenschutz nicht in die Lichtquelle.

Hygiene:

- a) Der Lichtleiter ist sterilisierbar bei 134° C
- b) Handstück und Ladeschale sind nicht sterilisierbar und dürfen auch in keine Flüssigkeit eingetaucht werden.
Das Handstück sowie die Ladeschale sind mittels Desinfektionstücher durch Abwischen zu desinfizieren.

Garantie:

Auf das Gerät gewähren wir bei sachgemäßer Anwendung eine Garantie von 2 Jahren.

Ausgenommen von dieser Garantie ist der Akku und der Lichtleiter.
Bei unsachgemäßer Behandlung erlischt jeder Garantieanspruch.